

# ИНСТРУКЦИЯ

## Сухожаровой шкаф, стерилизатор NV-210



### Технические характеристики:

Терморегулятор: от 0 до 200 °С

Таймер: от 0 до 120 минут

Напряжение: 220 В

Мощность: 300 Вт

Размеры: 31x14x18 см

Объем рабочей камеры 1,8 литров.

Размер внутренней камеры: 25x12x6 см

### Применение:

1. Подключите шнур питания к стерилизатору и розетке (розетка евро стандарт).
2. Уложите стерилизуемый инструмент в ванну из нержавеющей стали и закройте крышку стерилизатора.
3. Установите необходимое время ( 15 мин. При температуре 125 градусов убивает 99,9 % всех микробов и бактерий).
4. Установите необходимую температуру ( стерилизатор включился).
5. Красный индикатор показывает, что стерилизатор начал работу.
6. Зеленый индикатор показывает, что начался

нагрев стерилизатора (как только он погаснет, значит стерилизатор набрал нужную температуру).

7. Красный индикатор погас – стерилизатор завершил работу.
8. Аккуратно откройте крышку стерилизатора и с помощью двух колец ( идут в комплекте) подцепите поддон за специальные ушки и извлеките его на заранее подготовленную поверхность.
9. Дождитесь полного остывания инструмента.

### Комплектация:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Стерилизатор – 1 шт  | 4. Предохранитель сетевой – 2 шт |
| 2. Шнур сетевой – 1 шт  | 5. Поддон из нерж. стали – 1 шт  |
| 3. Кольцо металл – 2 шт | 6. Инструкция – 1 шт             |