

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



масса нетто: 1000 гр.



ТАБЛЕТИРОВАННОЕ

ОПИСАНИЕ

Таблетки белого цвета с характерным запахом хлора, обладающая наряду с дезинфекционным действием также моющими свойствами.

Вес таблетки - 5,0 гр. Срок годности – 3 года.

Срок годности рабочего раствора – 1 сутки.

По потребительским свойствам дезинфицирующее средство «ДП-2Т Улучшенный» является улучшенным аналогом дезинфицирующего средства «ДП-2Т» производства ОАО «Алтайхимпром» имени Г.С. Верещагина. При производстве продукта используется только высококачественное сырье, производство оснащено современным технологическим оборудованием и современным оборудованием контроля качества готового продукта.

Состав: активное вещество трихлоризоциануровая кислота (40%) и вспомогательные компоненты.



**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДП-2Т УЛУЧШЕННЫЙ»**

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	таблетки белого цвета
2.	Запах	хлорный
3.	Средняя масса одной таблетки, гр.	4,75 – 5,25
4.	Массовая доля активного хлора, %	32 – 36
5.	Масса активного хлора в одной таблетке, гр.	1,50 – 1,92
6.	Приготовление рабочего раствора	средство растворяется в воде, рабочие растворы без осадка, наличие незначительного количества пены на поверхности рабочего раствора.
7.	Время приготовления рабочего раствора, мин.	не более 60 минут (саморастворение). Для ускорения приготовления рабочего раствора рекомендуется перемешивание.

АКТИВНОСТЬ: обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа А H5N1, H1N1, герпеса, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, а также дезодорирующим действием.

НАЗНАЧЕНИЕ: дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, резиновых и пропиленовых ковров, белья, посуды столовой, лабораторной, аптечной, предметов для мытья посуды, игрушек, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, обуви из полимерных материалов, уборочного инвентаря, медицинских отходов классов Б и В (перевязочный материал, ватно-марлевые тампоны, белье, спецодежда персонала, посуда столовая и лабораторная однократного использования, изделия медицинского назначения однократного применения, выделения - кровь, моча, мокрота, рвотные массы, фекалии, остатки пищи), емкостей из-под выделений, изделий медицинского назначения, инструментов (косметических, парикмахерских), мусоросборников, мусорокамер, мусоровозов и мусороуборочного оборудования; дезинфекция санитарного транспорта, транспорта для перевозки пищевых продуктов, общественного транспорта; проведение генеральных уборок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лечебно-профилактические учреждения, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинические, микробиологические, диагностические и другие лаборатории, процедурные кабинеты, пункты и станции переливания и забора крови, инфекционные очаги, коммунальные объекты (гостиницы, общежития, парикмахерские, СПА-салоны, салоны красоты, солярии, бани, прачечные, общественные туалеты и др.), учреждения культуры, отдыха, спорта (кинотеатры, офисы, спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бассейны и др.), предприятия продовольственной торговли и общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары, пищеблоки), продовольственные и промышленные рынки, пенитенциарные, военные учреждения, казармы, учреждения социального обеспечения (дома престарелых), аптеки, государственные унитарные предприятия, предприятия фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D; при проведении заключительной дезинфекции в детских дошкольных и подростковых учреждениях (детские сады, школы, гимназии, лицеи, школы-интернаты общего типа и специальные, учреждения дополнительного образования, учреждения для детей-сирот – дома ребенка, детские дома, средние учебные заведения - профессионально-технические училища и др., детские оздоровительные учреждения, учреждения отдыха, высшие учебные заведения.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА - полимерная банка объемом 1,25 л.

Масса нетто 1000 гр.

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА - четырехклапанный ящик из гофрированного картона, масса нетто 12 килограмм, вложение: тарная этикетка, инструкция по применению дезинфицирующего средства.

Транспортировка в оригинальных упаковках производителя в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары при температуре от минус 40⁰С до плюс 40⁰С.

ХРАНЕНИЕ: в упаковке производителя при температуре от минус 25 0С до плюс 35 0 С, в сухом темном, прохладном помещении, вдали от источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей, отдельно от горючих продуктов.