



АРМЕД®

NON PROGREDI, EST REGREDI


ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

F15T8



F30T8

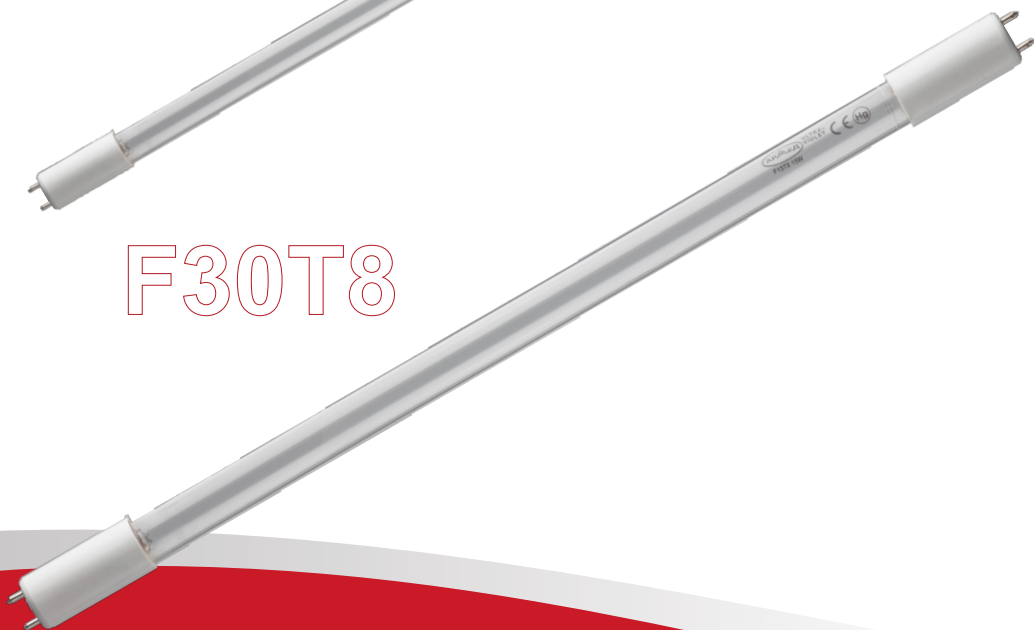

*Лампа ультрафиолетовая
«Armed»*

www.armed.ru

Представитель торговой марки «Армед» - компания SalutM.ru

Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОПИСАНИЕ

Лампа ультрафиолетовая «Armed»: F15T8, F30T8 (далее по Руководству - лампа) предназначена для использования в установках, предназначенных для обеззараживания бактерий, вирусов и других простейших организмов.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не ронять лампы;
- Хранить в упаковке;
- Не разбивать.

При работе с лампой, находящейся в поле зрения, необходимо защищать глаза защитными очками и иметь в виду, что облучение лампой при отсутствии защитных средств может вызвать болезненный ожог кожи любого участка тела, лица, рук, а также слизистых оболочек глаз.

Замену ламп производить только на оборудовании, отключенном от питающей сети.

Эксплуатация ламп должна осуществляться строго в соответствии с требованиями, указанными в соответствующей нормативной документации.

В случае, если лампа была разбита, необходимо аккуратно собрать и удалить осколки лампы в пакет. Место, где разбилась лампа обработать 1% раствором перманганата калия и хорошо проветрить помещение. Пакет с разбитой лампой, а также лампы, вышедшие из строя, необходимо передать на утилизацию специализированным организациям.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать резиновые перчатки в случаях, когда лампа была разбита.

ВНИМАНИЕ



Лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	F15T8	F30T8
Габаритная длина ($\pm 5\%$), мм	452	908,8
Длина без выводов ($\pm 5\%$), мм	436	893
Габаритная ширина ($\pm 5\%$), мм	20	20
Мощность ($\pm 5\%$), Вт	15	30
Номинальное напряжение ($\pm 10\%$), В	55	96
Интенсивность бактерицидного потока ($\pm 5\%$), Вт/м ²	3,5	9,0
Масса (нетто/брутто) (1 шт./25 шт.) ($\pm 5\%$), кг	0,067/2,1	0,123/4
Габариты транспортной упаковки (25 шт.) (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	465x140x140	920x140x140

- Полезный срок службы - 8000 ($\pm 5\%$) час .
- Спад бактерицидного потока после 5000 ($\pm 5\%$) час. - 15%.

Тип цоколя - G13.

Длина волны - 253,7 Нм.

Лампа представляет собой двухцольную газоразрядную лампу низкого давления. Она состоит из трубчатого стеклянного корпуса с токоподводящими цоколями по краям

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Производите дезинфекцию ламп в соответствии с Руководством РЗ.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей ламп. Наружные поверхности ламп обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ



Не проводите очистку наружных поверхностей ламп во время их работы и сразу после их отключения.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Лампы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Лампы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ламп без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность ламп. Повреждения ламп, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Ультрафиолетовая лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа _____ 25 шт.
2. Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции лампы, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Лампа ультрафиолетовая «Armed»: F15T8, F30T8 соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Изготовитель: "Jiangyin Jianshifu Equipment Co.,Ltd.", No.48 Xiao Kan Road Shizhuang, LinGang new city, Jiangyin, Jiangsu, China, Китай

Жиангиин Жианшифу Эквипмент Ко., Лтд., №48 Ксиао Кан Родад, Шижуанг, новый город ЛинГанг, Жиангиин, Джангсу

Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не более 8000 часов.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

Моск. обл., г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61