www.medbells.ru www.medbells.ru

- (1) Во время отображения "FUN 9" нажмите "ENT" и экран покажет "0001"
- (2) Нажмите "NEXT" и "SEL" для "0000"
- (3) Нажмите "ENT" для подтверждения, экран покажет цифры от "1111" до "9999" и затем "0001", что означает удачную очистку.

Заводские установки:

Режим напоминания - голосовое напоминание

Режим экрана - символьный экран

Тип кнопки - 4 (одно и многофункциональные кнопки одновременно)

V. Примечание:

Если имеется только 1 вызов, Y-650 показывает этот вызов все время, пока он не будет отменен.

Если имеется много вызовов, Y-650 показывает последний вызов и запоминает 10 других последних вызовов.

Проверка истории вызовов: нажмите "NEXT" и "SEL" для прокрутки последних 10 вызовов.

Отмена вызовов: нажмите "ENT" для отмены каждого вызова или нажмите "CANCEL" на многофункциональной кнопке вызова.

Зарядка аккумулятора: пожалуйста, выключите Y-650 и затем зарядите. Пожалуйста, заряжайте при низком заряде батареи.

Замечание: Пожалуйста, зарядите полностью перед первым использованием.

VI. Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 3,7 V (Li-On аккумулятор)

Рабочий ток: < 15 MA Чувствительность: 85 dB Частота: 433,92 MHz ±75k Рабочее расстояние: >50 м

Размеры: 65 мм * 44мм * 19мм

Α

Пейджер

I. Описание

Высокая яркость жидкокристаллического экрана с 3 режимами напоминания: звуком, вибрацией, одновременно звуком и вибрацией. Может работать с однофункциональной и многофункциональной кнопкой. Например, Y-A1,Y-A3,Y-B3

1 пейджер Y-650 может работать максимум с 99 кнопками, и может хранить 10 последних вызовов.

В режиме ожидания Y-650 показывает текущее время.

Пейджер Y-650 имеет 3 режима отображения: символьный, текстовый, совместно символьный и текстовый.

Во время подзарядки Ү-650 на экране мигает символ 🤲.

II. Программирование

Во время настройки:

FUN: Кнопка функции, вход/выход в установки

ENT: кнопка подтверждения

NEXT: выбор цифры SEL: выбор числа *Во время работы:* ENT: сброс вызова

NEXT/SEL: прокрутка истории вызовов вперед

и назад

...... III. Инструкция по эксплуатации

Список функций:

F1: сохранение кнопок вызова

F2: удаление кнопок вызова

F4: установка времени

F5: установка режима напоминания


F6: установка режима экрана

F7: выключение

F8: установка типа кнопок: одно функциональные кнопки или

многофункциональные кнопки

F9: восстановление заводских настроек

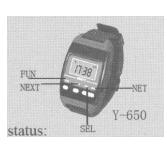

www.medbells.ru www.medbells.ru

Включение:

Удерживайте кнопку "FUN" нажатой в течение 3 секунд

Вход в режим настроек

Нажмите кнопку "FUN", экран покажет "F--1", цифра "1" мигает.

Нажмите "SEL" для выбора функции от 1 до 9

Нажмите "ENT" для подтверждения нужной для установки функции.

Выход из режима настроек:

В режиме настроек нажмите кнопку "FUN", экран покажет текущее время в режиме ожидания.

Отмена настроек:

В режиме настроек нажмите кнопку "FUN" для отмены установок и выхода из режима настроек.

Автоматический выход:

Пейджер Y-650 автоматически выйдет из режима настроек, если ни одной операции не производится в течение 40 секунд.

Выключение:

Войдете в режим "FUN--7"

IV. Подробная настройка функций

FUN—1: сохранение кнопок вызова

- (1) Во время отображения "FUN 1" нажмите "ENT", экран покажет "0001", цифра "1" мигает.
- (2) Нажмите "NEXT" и "SEL" для выбора номера от "0001" до "9999"
- (3) Нажмите "ENT" для подтверждения номера звонка , пока не появится "
- (4) Нажимайте кнопку вызова в течение 2 секунд, пейджер Y-650 издаст двойной звук и покажет следующий номер для сохранения.

Примечания:

- 1. Когда Y-650 показывает "E1" с двойным звуком и показывает другой номер, это означает, что эта кнопка вызова уже была сохранена под этим номером в пейджере Y-650. Пожалуйста, сначала удалите этот номер с помощью "FUN--2", затем сохраните под новым номером.
- 2. Когда Y-650 показывает "E2" с двойным звуком, это означает, что этот номер уже сохранен в пейджере.

3. Когда Y-650 показывает E3 с двойным звуком, это означает, что память заполнена и номер не может быть сохранен.

FUN—2: Удаление кнопки вызова

- (1) Во время отображения "FUN 2" нажмите "ENT", экран покажет "0001", цифра "1" мигает.
- (2) Нажмите "NEXT" и "SEL" для выбора удаляемого номера от "0001" до "9999".

Примечание:

- 1. Выберите "0000" для удаления всех номеров. Ү-650 покажет цифры от "1111" до "9999" со звуком, затем снова покажет "0001", что означает удаление всех номеров.
- 2. Выберите число от "0001" до "9999" для удаления сохраненных номеров. Y-650 покажет следующий номер для удаления.

FUN—4: Установка времени

Во время отображения "FUN 4" нажмите "NEXT" и "SEL" для установки текущего времени.

FUN –5: Установка режима напоминания (по умолчанию: голосовые подсказки)

Во время отображения "FUN 5" нажмите "SEL" для выбора режима напоминания: 1, 2 или 3, затем подтвердите его. (1 – голосовая подсказка; 2 – вибрация; 3 – голосовая подсказка и вибрация)

FUN—7: Выключение

Во время отображения "FUN 7" нажмите "ENT", экран покажет "OFF". Нажмите "ENT" снова для выхода.

FUN—8: Установка типа кнопок: одно-кнопочной или многокнопочной кнопки

Во время отображения "FUN 8" нажмите "ENT", экран покажет "1" или "4" Примечание:

- 1 одно функциональная кнопка. Работает только с одно функциональными кнопками вызова, например, Y A1
- 4 одновременная работа с одно функциональными и многофункциональными кнопками. Например, Y-A1 и Y-A3, Y-B3 Нажмите "SEL" для выбора " 1" или " 4" и подтвердите его.

F—9: восстановление заводских установок