



Инструкция

*медицинской сестре по работе с палатной вызывной сигнализацией
«Партнер-1М»*

Сигнализация вызывная "Партнер-1М" работает круглосуточно и обеспечивает возможность вызова пациентом дежурной медсестры с любого индивидуального пульта при помощи звуковой сигнализации и световой индикации на центральном пульте, а также световой индикации на индивидуальном пульте пациента и коридорной лампой, устанавливаемой над входом в палату.

Услышав сигнал вызова, дежурная медицинская сестра обязана:

- установить номер палаты (по номеру палаты на центральном пульте или светящейся коридорной лампе);
- подойти к пациенту (светящийся светодиод на индивидуальном пульте);
- отключить звуковую сигнализацию и световую индикацию при помощи палатного пульта;
- оказать необходимую помощь пациенту.

Отключение сигнализации возможно, как с палатного, так и с центрального пульта.

Запрещается:

- включать центральный пульт в сеть, если шнур сетевого питания скручен, связан или поврежден.
 - вскрывать (разбирать) изделие "Партнер-1М" и его составные части.
 - включать изделие в сеть влажными руками во избежание удара электрическим током.
- При обнаружении дыма или побочных запахов, исходящих от изделия,

Немедленно отсоедините шнур питания от сети.

ООО «МедиКо»»

199178, г. СПб, 5-я линия В.О., д. 70, проходная № 4, домофон 60, оф. 60

Тел: (812)331-36-98 (812) 943-93-24

e-mail: anevsky@mail.ru