


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - www.bienair.com


СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В АВТОКЛАВЕ КЛАССА В

рекомендуем MELAquick или Vacuklav
фирмы MELAG

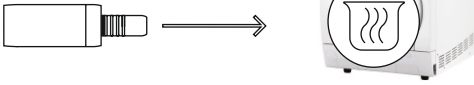


СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIFLUID

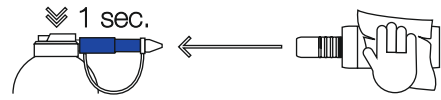

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ


рекомендуем MELAtherm 10
фирмы MELAG

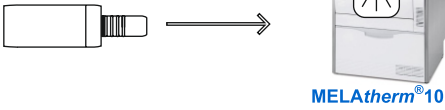


РУЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ




ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

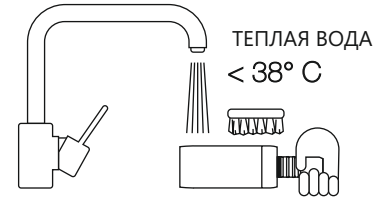

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА AQUACARE**

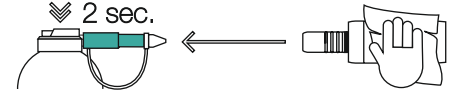

**ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ
СРЕДСТВА SPRAYNET**

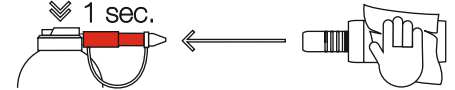

**НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА
SPRAYNET**




С УГОЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ

НЕ стерилизуемые микродвигатели

только кожу





ПОДГОТОВКА

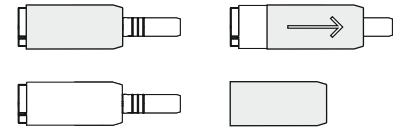


Снятие кожу. У моторов серии MC2 (IR) и MC2 GTAV, кожу для стерилизации отсутствует. Пожалуйста, смотрите руководство по эксплуатации, в ней вы найдете более подробную информацию.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ

ПОДГОТОВКА

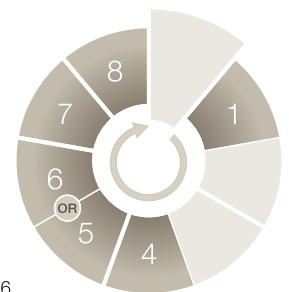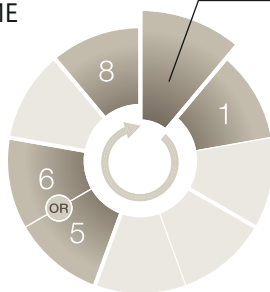

БЕЗЩЕТОЧНЫЙ

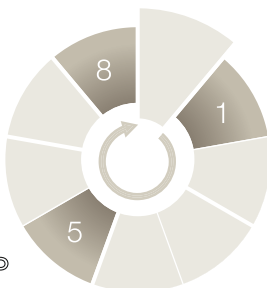

СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ
НА ОБОРОТЕ (НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ)

СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА МИКРОМОТОРАМИ BIEN AIR



Aquacare

500 мл чистящее средство в виде спрея, в уп. 6 шт. для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором
арт. 1600617-001



Spraynet

500 мл чистящее средство в виде спрея, в уп. 6 шт. для очистки инструментов и приборов
арт. 1600036-001



Lubrifiuid

500 мл смазочное средство в виде спрея, в уп. 6 шт. для турбин, механических наконечников и моторов серии MX, Basch и Aquilon.
арт. 1600064-001



Чистящая игла

Для прочистки каналов распылителей турбин, угловых и прямых наконечников. Идет в комплекте с каждым наконечником. Так же можно приобрести отдельно, в уп. 10 шт
арт. 1000001-010

WWW.BIENAIR.COM



ООО ПВП «КОНТАКТ»

Россия, 662521, Красноярский край,

п. Березовка, ул. Солнечная 1А/3

Многоканальные телефоны:

+7 (391) 273-71-56, +7 (39175) 2-31-56

www.contact-kr.ru e-mail: info@contact-kr.ru

ФИЛИАЛ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Телефон: +7 (343) 270-00-83
e-mail: ekaterinburg@contact-kr.ru

ФИЛИАЛ В Г. ИРКУТСК

Мн телефон: +7 (3952) 423-868
e-mail: irkutsk@contact-kr.ru

ФИЛИАЛ В Г. АБАКАН

тел.: +7 (3902) 22-13-12, 22-80-45
e-mail: abakan@contact-kr.ru

ФИЛИАЛ В Г. АЧИНСК

Мн телефон: +7 (39151) 7-87-87
e-mail: medico@contact-kr.ru

ФИЛИАЛ В Г. ЛЕСОСИБИРСК

тел./факс: +7 (39145) 5-14-54, 5-24-34
e-mail: mtcontact@contact-kr.ru



УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ДЛЯ КЛИНИК

тел.: +7 (391) 273-71-56, доб. 140
e-mail: service@contact-kr.ru



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

тел.: +7 (391) 273-71-56, доб. 116
e-mail: lelaus-a@contact-kr.ru