
ООО «НПО «БИОТ»



INFO@NPO-BIOT.RU



+ 7 342 2584 584

Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛЕВЧЕНКО 1,
ОФ. 1

1ВИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ

МАСКА (ПОВЯЗКА) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МНОГОРАЗОВАЯ ХЛОПЧАТУБУМАЖНАЯ

(ТУ 13.92.29-005-35194294-2020)

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Перед первым применением, прогладьте маску с двух сторон, при температуре (100 °С), с паром.



Отрегулируйте маску таким образом, чтобы она плотно прилегала к Вашему лицу.



Носите маску не более 3-х часов, после чего постирайте маску.



Стирайте маску при температуре 60 °С.



После стирки, проглаживайте маску с двух сторон, при температуре 100 °С, с паром.

Будьте здоровы!

Декларация о соответствии на изделие:

№ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.32339/20

С заботой о Вас, компания ООО «НПО «БИОТ».
