

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ КОНФИГУРАЦИЙ КАРТРИДЖЕЙ

LLT 0.35 1P

0.301R

LLT 0.3

0.30 1RI

LT 0.3'

301

0.3

ኑ 1F

0.3

0.301R

0.33 1RLMT 0.27 1F

LT 0.30 1RLLT 0.3

0.33 1RLMT 0.27

LLT 0.30 1RLLT 0

0.33 1RLMT 0.2

LLT 0.30 1RLLT

0.33 1RLMT 0.2

0.30 1RLLT 0.3

1RLMT 0.271R

 RLLT 0.35 IRLM

 30 IRLMT 0.33 IRL

 0.35 IRLMT 0.30

 RLMT 0.33 IRL

ИСКУССТВО РМU С ТНЕМ



ОБОРУДОВАНИЕ ТНЕМ — ЭТО ПРОРЫВ.

В 2024 году мы стали настоящим открытием для мира перманентного макияжа. И в 2025 вы в этом убедитесь!

ТНЕМ - это бескомпромиссное качество игл, эксклюзивный дизайн и техническое превосходство, которое не только облегчит работу, но и в разы увеличит ваши результаты! И многие хотят попробовать наши картриджи на практике - но порой не знают,

КАКИЕ КОНФИГУРАЦИИ ИМ ПОДОЙДУТ - В ГАЙДЕ ЭТОТ ВОПРОС ОТПАДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО!

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ВАША РАБОТА СТАЛА ШЕДЕВРОМ?

Если да, то читайте дальше и откройте для себя все преимущества картриджей для перманентного макияжа ТНЕМ.

Здравствуйте

Хочу попробовать ваши картриджи

Скажите пожалуйста какой конфигурации брать ?



ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.

Поднимите свой профессионализм. Заслужите признание.

Двойная напайка для четкого прокраса

медицинская сталь с плотностью 8гр/см³

Мембрана средней жесткости обеспечивает четкий прокрас Носик узкой формы позволяет сократить расход пигмента на 1 процедуру


Ультратонкий размер (диаметр 4мм)

дает возможность увидеть глазами каждое движение

Минимальный шум в работе - 70 дБ



ОПРЕИМУЩЕСТВАХ ТНЕМ МОЖНО ГОВОРИТЬ ВЕЧНО:

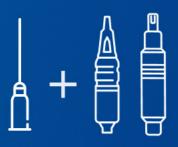

совместимость:

широкий ассортимент картриджей, совместимых с различными устройствами для перманентного макияжа, что позволяет мастерам выбрать идеальный вариант для своих нужд.



ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ:

Уникальная конструкция игл обеспечивает точное нанесение пигмента и стабильный поток, что позволяет достигать идеальных результатов даже на сложных участках.



ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Интуитивно понятный дизайн и простота замены картриджей экономят время мастера и повышают эффективность работы.



#10 0.30 IRLLT

THEMPMU.COM

В АРСЕНАЛЕ ТНЕМ ИГЛЫ:

- 0.20 **1RLLT**
- 0.25 **1RLLT**
- 0.27 **1RLLT**
- 0.30 **1RLLT**
- 0.30 **1RLMT**
- 0.33 **1RLLT**
- 0.33 **IRLMT**
- 0.35 **1RLMT**
- 0.25 **3RLLT**
- 0.30 **3RLLT**

тнем

НО КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ

и какие результаты получаются в итоге? Разберемся в этом гайде!

Ключевые понятия:

R (Round):	Иглы спаяны в круг.
L (Long Taper):	Длинная заточка иглы. Универсальная, подходит для разных техник.
M (Medium Taper):	Средняя заточка иглы. Более мягкий и щадящий ввод пигмента.
1 (Single):	Одна игла.
3 (Triple):	Три иглы, спаянные вместе.

Диаметр (0.20, 0.25, 0.27, 0.30, 0.33, 0.35): Толщина иглы, измеряется в миллиметрах, и выбирается в зависимости от плотности кожи клиента и мастерства специалиста.

РАЗБЕРЕМ КЛАССИФИКАЦИЮ ИГЛ ПО ТИПУ ЗАТОЧКИ

Иглы имеют разные типы заточки:



- Средняя острота и длина кончика.
- Используется для широких линий, заполнения больших участков кожи и создания плавных переходов.
- Универсальна для губ, бровей и век.

Long Taper

- Острый и длинный кончик.
- Позволяет пигменту глубоко попадать под кожу и создавать тонкие линии.
- Не рекомендуется начинающим мастерам из-за высокой травмоопасности.



- Иглы спаянные в форме круга.
- Созданы для контуров и техники штрихов (WhipShading).

В ТНЕМ представлен широкий ассортимент конфигураций игл, но мы подготовили для вас

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТИХ КОНФИГУРАЦИЙ:

0.201RLLT

Диаметр: Самый тонкий. Заточка: Острая.

Тонкие линии: Идеальна для создания очень тонких, четких волосков в микроблейдинге (если используете машинку для этого) или для прорисовки мелких деталей в перманенте бровей, век, губ.

Деликатная работа: Подходит для работы на очень тонкой и сухой коже, где требуется минимальная травматизация.

Контуры: Можно использовать для прорисовки очень точных контуров губ или межресничного пространства.

Техники: Теневая растушевка, волосковая техника, контурная техника, для работы в очень деликатных зонах.

Примечание: Требует аккуратной работы и хорошего контроля глубины.

0.251RLLT

Диаметр: Очень тонкий. Заточка: Острая.

Универсальность: Чуть более толстая, чем 0.20, но все еще подходит для тонких линий, контуров и проработки мелких деталей.

Пиксельное напыление: Подходит для техник пиксельного напыления и создания легкой тени.

Деликатная работа: Хорошо подходит для работы на чувствительной коже.

Техники: Волосковая техника, пиксельная растушевка, контур, межресничка.

Примечание: Хорошо контролируемый ввод пигмента, требует аккуратности.



Универсальный выбор для бровей: Отличный вариант для волосковых техник, мягкой растушевки и создания легкой тени в бровях.

Мягкий контур: Можно использовать для контура губ, если хотите более легкий и естественный результат.

Техники: Волосковые техники, мягкая растушевка, контур губ, межресничка.

Примечание: Хорошо контролируемая имплантация пигмента, подходит для начинающих мастеров.



Универсальность: Более универсальная игла, подходит для многих техник на бровях и губах.

Плотные линии: Создает более выраженные линии, чем 0.25 и 0.27, но все еще достаточно деликатная.

Заполнение: Хорошо подходит для заполнения цветом небольших участков.

Техники: Волосковые техники, пиксельное напыление, растушевка, контур губ.

Примечание: Более универсальная, но все равно требует контроля глубины.



Диаметр: Средний. Заточка: Средняя.

Универсальный выбор: Отличный вариант для работы на разных участках лица.

Плотный цвет: Хорошо подходит для более плотного заполнения цветом, создания выраженного контура.

Интенсивность: Позволяет более интенсивно вносить пигмент по

сравнению с длинной заточкой.

Техники: Заполнение цветом, плотный контур, растушевка (плотная).

Примечание: Подходит для тех, кто предпочитает более плотное нанесение пигмента.

O.331RLLT Диаметр: Средний. Заточка: Острая.

Универсальная для бровей: Подойдет для мягкого заполнения и волосковых техник на бровях.

Более интенсивный цвет: Обеспечивает более плотное покрытие и видимость пигмента, чем более тонкие иглы.

Быстрая работа: Позволяет работать быстрее, не теряя при этом в деликатности.

Техники: Мягкая растушевка, волосковые техники, контур губ, заполнение цветом.

Примечание: Удобна в работе, хорошо подходит для большинства техник.

0.331RLMT

Диаметр: Средний. Заточка: Средняя.

Плотное заполнение: Отличный вариант для плотного заполнения цветом и создания выраженного контура.

Быстрая работа: Позволяет быстро заполнять участки цветом.

Универсальность: Подходит для разных зон, где требуется интенсивное и плотное покрытие.

Техники: Плотное заполнение цветом, выразительный контур, плотная растушевка.

Примечание: Требует точного контроля глубины, может травмировать кожу при неправильном применении.

0.351RLMT

Диаметр: Толстый. Заточка: Средняя.



Плотное заполнение и контур: Подходит для быстрого и плотного заполнения цветом и создания четких линий. Используется для плотной и пористой кожи, не рекомендуется для сухой, обезвоженной кожи и макияжа век.

Быстрая работа: Идеальна для мастеров, которые работают быстро и уверенно.

Крупные зоны: Подходит для работы на больших участках.

Техники: Плотное заполнение цветом, выразительный контур, плотная растушевка.

Примечание: Требует хорошего контроля глубины и аккуратности, подходит для опытных мастеров.

0.25 3RLLT

Диаметр: Тонкий (общий диаметр группы из трех игл). Заточка: Острая.

Мягкое заполнение: Отличный вариант для быстрого, но мягкого заполнения цветом бровей.

Растушевка: Хорошо подходит для создания мягкой тени на бровях и губах.

Легкая текстура: Создает эффект более рыхлой и мягкой текстуры.

Техники: Мягкое заполнение цветом, растушевка, создание эффекта омбре.

Примечание: Требует хорошего контроля глубины, подходит для более продвинутых мастеров.

0.30 3RLLT

Диаметр: Средний (общий диаметр группы из трех игл). Заточка: Острая.

Ускоренное заполнение: Позволяет быстрее заполнять большие участки цветом, особенно при растушевке бровей или губ.

Мягкость: Обеспечивает мягкое и естественное покрытие.

Растушевка: Хорошо подходит для создания плавных переходов цвета.

Техники: Растушевка, мягкое заполнение, создание эффекта омбре.

Примечание: Позволяет работать быстрее, но требует контроля глубины и давления.

тнем



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРОВ



Выбор конфигурации игл зависит от вашего опыта и предпочтений.



Техника:

Выбор иглы должен соответствовать выбранной вами технике.

Глубина введения:

Всегда контролируйте глубину введения иглы, чтобы избежать травмирования кожи.

Пробный проход:

Сделайте пробный проход на искусственной коже, прежде чем работать на клиенте.

Кожа клиента:

Учитывайте тип и особенности кожи клиента.



Надеемся, эти рекомендации помогут вам в вашей практике. Не бойтесь экспериментировать и находить свои любимые комбинации, используя картриджи THEM!

ПОЧЕМУНАС ВЫБИРАЮТ?

ТНЕМ - это качество, удобство в работе, стоимость, они идеальны в работе любыми пигментами, на любой тип кожи, в любой технике. Я с первого дня Амбассадор ТНЕМ. Это про доверие. И я не ошиблась. Лучшие иглы на рынке ПМ

МАРИЯ СКОТНИКОВА

Картриджи отличаются своей на рынке и нужен в моей студии для

АЛЛА РОМАЗАНОВА

продуктивностью и скоростью нанесения, отработала коробку и решила, что это один из лучших продуктов за последнее время мастеров и в моем магазине для учеников





СПОНСОРИДЕАЛЬНЫХ **РАБОТ!**

ПАРВИНА ЮСУПОВА

ТНЕМ - это уверенность в каждом штрихе и мой выбор по любви



ЕЩЁ БОЛЬШЕ СОВЕТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ИЩИТЕ В НАШЕМ АККАУНТЕ @THEM_PMU



ОТКРОЙТЕ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С КАРТРИДЖАМИ ТНЕМ!

- Ж Бескомпромиссное качество игл, эксклюзивный дизайн и техническое превосходство
- Ж Конфигурации для любого, даже самого сложного случая
- 💥 Самые передовые технологии и инновации

ПОПРОБУЙТЕ КАРТРИДЖИ ПРЯМО СЕЙЧАС

заказывайте на нашем главном сайте thempmu.com

