


DEFENDER®

МАНУАЛ IRON S

Поздравляем
с покупкой
роторного
аппарата
IRON S!

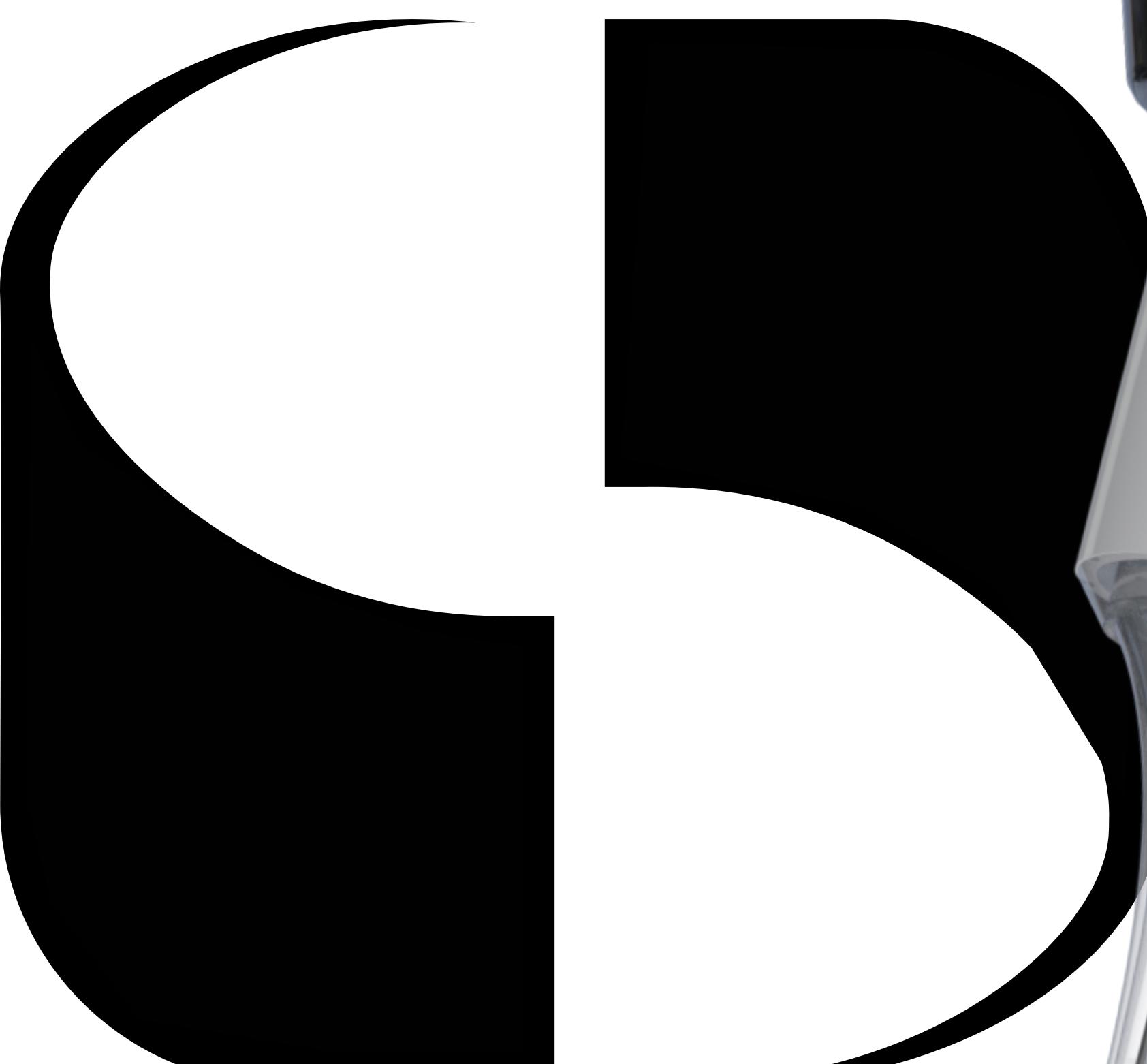

Внимательно прочтите инструкцию
перед началом работы.



Характеристики

Длина	112 мм
Вес	150 г
Разъем	RCA
Мощность мотора	5 Вт
Вольтаж	до 10 В
Скорость обращения	8 000 об/мин
Ход иглы	3,5 мм
Спроектировано	в США
Материал корпуса	авиационный алюминий
Гарантия и сервисное обслуживание	1 год

Назначение

Универсальный роторный аппарат для перманентного макияжа.

Расходные материалы

Совместим со всеми стандартными модульными картриджами.

Рекомендуем использовать картриджи с мембраной защищающей аппарат от протечки пигмента внутрь.

Комплектующие

Каппарату подходит стандартное силовое оборудование с подключением кабеля RCA.

Рабочий вольтаж: 3,5 - 10 В

Не предназначен для работы на более высоком вольтаже.

Ход иглы: 3,5 мм

Аппарат IRON S среднеход, поэтому во избежание разбрызгивания пигмента рекомендуем выставлять небольшой вылет иглы.

Двигатель

Аппарат оснащен малоинерционным двигателем, разработанным специально для компании DEFENDERR.

В отличие от двигателей с железным сердечником, малоинерционный двигатель имеет более низкую инерцию ротора. Кроме того, электромоторы обладают пониженным уровнем вибрации и шумов, а также лучшей управляемостью.

Расходные материалы

Каппарату подходят стандартные блоки питания с возможностью подключения кабеля RCA.

Остерегайтесь подделок:
подключайте аппарат только
к оригинальному силовому
оборудованию.

Комплектация

Аппарат, клипкорд RCA,
уплотнительные кольца.






- 1 Мотор
- 2 Поворотный держатель
- 3 Слот для картриджа
- 4 Гнездо для RCA
- 5 Клипкорд RCA
- 6 Уплотнительные кольца
- 7 Гарантийный талон

Начало работы

1. Наденьте специальную барьерную защиту (ПЭТ) на машинку и кабель RCA (5).
2. Вставьте в слот (3) модульную иглу (картридж). Для фиксации поверните картридж по часовой стрелке, чтобы модуль встал в распор и плотно зафиксировался. У разных производителей модулей отличаются посадочные размеры из-за чего они могут хуже вставляться в держатель.

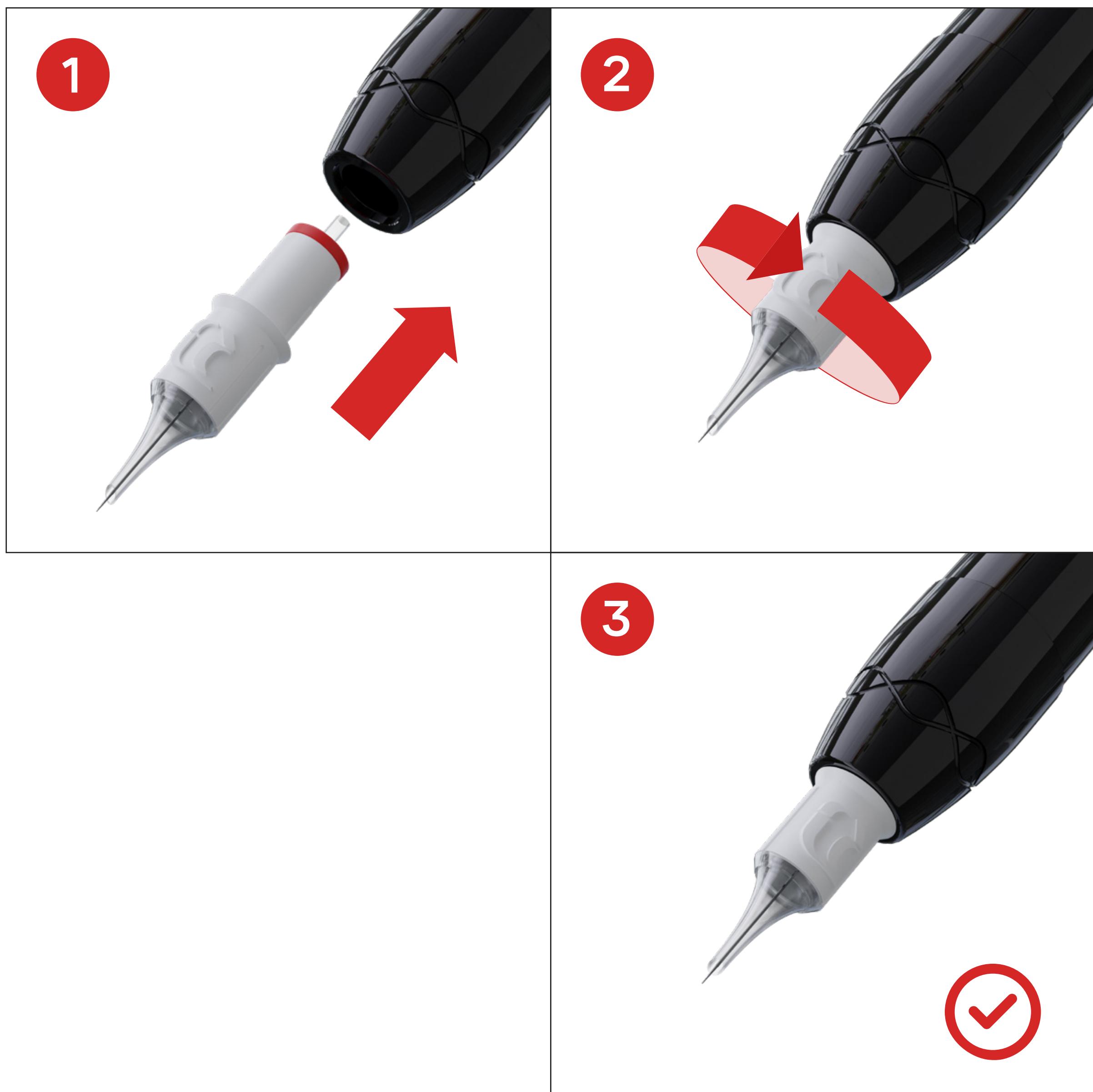

3. Отрегулируйте вылет иглы.

Регулировка вылета иглы производится путем вращения поворотного держателя (2). Аппарат Iron S – среднеход, поэтому во избежание разбрызгивания пигмента рекомендуем выставлять небольшой вылет иглы.



4. Подключите машинку к источнику питания, с помощью кабеля RCA к гнезду (4).



5. Включите блок питания. Установите напряжение на блоке питания 3-7 В, в зависимости от конфигурации иглы и стиля работы. Не превышайте максимальный вольтаж в 10 В.

6. Настройте машинку для ровной и тихой работы с помощью регулировки вылета иглы (2) и вольтажа. Все настройки индивидуальны и зависят от вашего силового оборудования, зоны нанесения и техники работы.

- Не переворачивайте машинку в рабочем состоянии – аппарат не предназначен для этого и будет издавать треск и нетипичные звуки.

Обслуживание

Содержите аппарат в чистоте.

До и после каждого использования удаляйте все возможные загрязнения, протирая машинку спец. дезинфицирующим средством.

Через каждые 4-6 месяцев снимайте уплотнительное кольцо и смазывайте резьбу в месте стыка держателя и аппарата. Для этого подойдет специальное масло для роторных или швейных машинок.

При необходимости замените уплотнительное кольцо на новое (в комплекте с аппаратом идут 2 запасных уплотнительных кольца).

Безопасность

Пользуйтесь картриджами с мембраной защищающей от протечки пигмента в аппарат. Всегда используйте одноразовые стерильные иглы и резиновые перчатки. Всегда используйте барьерную защиту на машинку и кабель RCA.

Производитель не несет ответственность за ущерб, инфекции или повреждения, нанесенные клиенту, вызванные небрежностью или неправильным использованием машинки.

Стерилизация

Для стерилизации аппарата открутите держатель и поместите его в автоклав ультразвуковую ванну или сухожаровый шкаф.

Не держите держатель в сухожаровому шкафу при температуре выше 100° по Цельсию (73.15° по Кельвину, 212° по Фаренгейту): это приведет к изменению его цвета.



■ Стерилизации аппарата целиком в автоклаве, ультразвуковой ванне или сухожаровом шкафу приведет к поломке и неисправности его мотора.

■ Не распыляйте и не выливайте дезинфицирующие средства на аппарат, во избежание попадания жидкостей в мотор.

Используйте ватные спонжи или одноразовые бумажные полотенца. Погружение аппарата целиком в спирт или любую другую жидкость приведет к поломке аппарата и его мотора.
Стерилизации подлежит только откручивающийся держатель.

Гарантия

На машину действует гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки.

Гарантия распространяется на заводские неисправности и не действует в следующих случаях:

- Превышено входное напряжение выше 11 В (максимальное допустимое напряжение – 10 В).
- Аппарат пострадал от агрессивных неспиртовых антисептических средств.
- Аппарат пострадал вследствие механических повреждений и падений на твердые поверхности.
- Аппарат имеет следы коррозии.
- Аппарат использовался не по назначению (т.е. не для перманентного макияжа и тату).
- Аппарат был погружен целиком в спирт или любую другую жидкость (исключение – откручивающийся держатель).
- Аппарат был погружен целиком в автоклав, сухожаровый шкаф или ультразвуковую ванну (исключение – откручивающийся держатель).
- Аппарат разбирался или подвергалась самостоятельному ремонту (без разрешения производителя).
- Аппарат или его компоненты были изменены.

Что делать, если аппарат издает странные звуки, когда его переворачиваешь (картриджем вверх)?

Как и у любой другой техники, каждый мотор разрабатывается с учетом его функционального назначения. Поскольку ни один из способов перманентного макияжа не включает в себя работу снизу вверх, аппарат IRON S не приспособлен к таким манипуляциям.



! Пожалуйста, не переворачивайте машинку в рабочем состоянии.

Что делать в случае неисправности аппарата?

Отправьте на почту service@defenderrs supply.com письмо с описанием проблемы. Для более оперативного решения проблемы прикрепите к письму видео по которому можно будет произвести первичную диагностику. Приблизительное время ответа – 3 рабочих дня.

Сохраняйте чек и гарантийный талон в течение года после покупки.

Могу ли я починить аппарат после окончания гарантийного периода?

Да, вы можете отправить аппарат на диагностику и ремонт за свой счет. Отправьте письмо на почту service@defenderrs supply.com с описанием проблемы, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Для более оперативного решения проблемы прикрепите к письму видео по которому можно будет произвести первичную диагностику.

© Defenderr Co.
www.defenderrs supply.com

По вопросам партнерства и сотрудничества: info@defenderrs supply.com

Instagram:
[@defenderrs supply](https://www.instagram.com/@defenderrs supply/) (для русскоговорящих)
[@defenderrofficial](https://www.instagram.com/@defenderrofficial/) (для англоговорящих)