

# SONIX-100

## БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ НА ОСНОВЕ ХЛОРА

### Назначение:



Препарат для обработки поверхностей в помещениях, жёсткой мебели, сантехнического и иного оборудования (в т.ч. приборов и аппаратов), белья, игрушек, посуды (в т.ч. лабораторной и аптечной), предметов для мытья посуды и для ухода за большими, медицинскими изделиями, биологическими и смывными жидкостями, медицинских отходов из текстиля и др., уборочного инвентаря и расходных материалов, резиновых и пластмассовых ковриков, обуви.

### Область применения:

Медицинские и лечебно-профилактические учреждения, инфекционные очаги, клинические, бактериологические, вирусологические и др. диагностические лаборатории, процедурные кабинеты, станции переливания крови, аптеки, на санитарном транспорте; предприятия фармацевтической и биотехнологической промышленности в помещениях классов чистоты С и D; предприятия коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты); торговые, развлекательные центры, продовольственные и промышленные рынки, организации образования, объектах спорта (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, т.п.), кинотеатры, музеи и др., пенитенциарные, организации соцобеспечения (дома престарелых и др.), учреждения и организации силовых ведомств, предприятия общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые); объектах транспортной системы (автобусы, трамваи, троллейбусы, электропоезда и пр.), а также в быту.

### Свойства:



Таблетки быстрорастворимые с содержанием хлора нейтральные с антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая микобактерии туберкулёза на Mycobacterium terra), вирусов (в т.ч. энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, ротавирусов, норовирусов, аденовирусов, вирусов «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, Коксаки, ЕСНО, герпеса и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов и плесени на стеклах, пластике, резине и коррозионностойких металлах. Пожаро- и взрывобезопасные.

### Способ применения:



Раствор готовить в эмалированной (без повреждений), стеклянной или пластиковой ёмкости из расчёт 1 таблетка на 10л воды. Допускается добавление из расчёта 1:200 (5мл+995мл раствора=1л 0,5%-раствора) мощного средства, за исключением кислотных препаратов. Данные по объектам, способам, концентрации и экспозиции приведены ниже. На основе данных использовать:

1. Для полов, стен, дверей, жёсткой мебели: протереть смоченной салфеткой ( $\geq 100\text{мл/м}^2$ ) или распылить ( $\geq 150\text{мл/м}^2$ ).

После экспозиции помещение проветривать  $\geq 15$  мин. Паркет и полированную деревянную мебель вытирать насухо!

2. Для сантехники (ванны, раковины, унитаза и др.): нанести щёткой или протереть смоченной в растворе салфеткой ( $\geq 100\text{мл/м}^2$ ), либо распылить ( $\geq 150\text{мл/м}^2$ ). Обработку проводить 2 раза с интервалом 15 мин.

3. Для белья: вещь за вещь погрузить из расчёта сухого белья 1кг/4л раствора (при туберкулёзе и ООИ на 5л), ёмкость закрыть. После экспозиции выстирать.

4. Для обуви: погрузить в раствор, после экспозиции прополоскать и высушить.

5. Для посуды (без пищевых остатков): погрузить из расчёта 1 комплект/2л, ёмкость закрыть, после экспозиции промыть до исчезновения запаха хлора. Инвентарь для мойки посуды погрузить, после экспозиции промыть и высушить.

6. Для предметов ухода за больными: погрузить и закрыть, либо протереть смоченной салфеткой. После экспозиции промывать до исчезновения запаха хлора.

7. Для обработки медицинских изделий: использовать 0,2%-раствор (экспозиция 120 мин) или 0,3% (60 мин). Погрузить (полости заполнить без воздушных пробок; разъёмные изделия в разобранном виде; изделия с замковыми частями раскрытыми). Толщина слоя над объектом  $\geq 1$  см. Ёмкость закрыть. После экспозиции промывать до исчезновения запаха хлора (изделия из металлов и стекла  $\geq 3$  мин, из резины и пластика  $\geq 5$  мин). Растворы использовать многократно до изменения вида (помутнение, осадок и т.д.), но  $\leq 5$  сут.

8. Для медицинских отходов (перевязочный материал, салфетки, тампоны): погрузить в отдельную ёмкость с 0,3%-раствором, экспозиция 60 мин, затем утилизировать.

9. Для транспорта после перевозки инфекционного больного: по режимам инфекции. Профилактическую обработку проводить по режимам, представленным в Табл. 3.

10. Для уборочного материала и инвентаря: замочить, после экспозиции прополоскать и высушить.

**Примечание:** работоспособность раствора  $\leq 3$  сут. Не оставлять препарат открытым на воздухе!

### Основные характеристики:

**Состав:** дихлоризоцианурат натрия, вспомогательные компоненты.

**Масса 1 таблетки, г:** 3,4

**Значение pH 1%-раствора:**  $7,0 \pm 0,5$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

### Предупреждающие меры:



**Опасно! Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к хлору, аллергией, хроническими заболеваниями дыхательных путей!** Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, при распылении дополнительно защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными препаратами!* При концентрациях  $\geq 0,1\%$  использовать респираторы типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В. Обработку проводить в отсутствие людей и животных, после

экспозиции провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора ( $\geq 15$  мин). Обработку погружением и замачиванием проводить в проветриваемом помещении, а ёмкости закрывать крышками. Работу в очаге сибирской язвы, а также при концентрации раствора  $\geq 2\%$ , проводить в противочумном костюме с противогазом.

Срок годности: 6 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

#### Логистические данные:

Артикул	Нетто, кг	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
281-1	1	4610014462167	6	14610014462164

#### Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом хорошо проветриваемом месте отдельно от лекарственных средств, пищевых продуктов и кормов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и увлажнения! Гигроскопично!

### ТАБЛИЦЫ РАСЧЁТОВ

Таблица 1. Приготовление растворов:

%	0,015	0,03	0,06	0,10	0,12	0,15	0,2	0,3	0,5	0,6	1,0	1,2	1,5	2,0	2,4
шт.	1	2	4	7	8	10	14	20	36	40	80	96	100	140	160

где, - %: концентрация раствора по активному хлору (по АХ);

- шт.: количество таблеток, необходимое для приготовления 10л раствора

Таблица 2. Режимы обработки при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулёза)

Объект обеззараживания	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин	Способ обеззараживания
Изделия мед. назначения	0,12	60	Погружение
Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт*	0,015 0,03	60 30	Протирание, орошение
Предметы ухода за больными	0,06 0,12	90 60	Погружение, протирание
Посуда без пищевых остатков	0,015	15	Погружение
Посуда с пищевыми остатками	0,12	60	Погружение
Предметы для мойки посуды	0,12	120	Погружение
Посуда лабораторная	0,12	60	Погружение
Бельё, не загрязнённое выделениями	0,015	60	Замачивание
Бельё, загрязнённое выделениями	0,12	120	Замачивание
Игрушки	0,03	60	Погружение, протирание
Сантехника*	0,015 0,03	60 30	Протирание/орошение 2 раза
Уборочный инвентарь и материал*	0,12	120	Погружение, замачивание

\* допускается добавление моющего средства.

Таблица 3. Режимы обработки при туберкулёзе

Объект обеззараживания	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин	Способ обеззараживания
Изделия мед. назначения	0,21	60	Погружение
Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт*	0,06 0,12	60 30	Протирание, орошение
Предметы ухода за больными	0,21 0,3	60 45	Погружение, протирание
Посуда без пищевых остатков	0,06	30	Погружение
Посуда с пищевыми остатками	0,3	120	Погружение
Предметы для мытья посуды	0,21	120	Погружение
Посуда лабораторная	0,3	120	Погружение
Бельё, не загрязнённое выделениями	0,06	60	Замачивание
Бельё, загрязнённое выделениями	0,21	120	Замачивание
Игрушки	0,06 0,12	30 15	Погружение, протирание
Сантехника*	0,12 0,21	90 60	Протирание/орошение 2 раза
Уборочный инвентарь и материал*	0,21	120	Замачивание

\* допускается добавление моющего средства.

Таблица 4. Режимы обработки при кандидозах и дерматофитиях

Объект обеззараживания	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин		Способ обеззараживания
		кандидозы	дерматофитии	
Изделия мед. назначения	0,21	30	60	Погружение
Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт*	0,06 0,12	60 30	60 30	Протирание, орошение
Предметы ухода за больными	0,21	30	60	Погружение, протирание
Посуда без пищевых остатков	0,06	30	-	Погружение
Посуда с пищевыми остатками	0,21	120	-	Погружение
Бельё, не загрязнённое выделен.	0,06	60	120	Замачивание
Бельё, загрязнённое выделениями	0,21	60	120	Замачивание
Обувь	0,21	60	120	Погружение
Игрушки	0,12	30	60	Погружение, протирание
Сантехника*	0,12	60	120	Протирание или орошение 2 раза
Резиновые коврики	0,12	-	120	Протирание, орошение
Уборочный инвентарь	0,21	60	120	Замачивание

\* допускается добавление моющего средства.

**Таблица 5. Режимы обработки при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия и др.)**

Объект обеззараживания	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Изделия мед. назначения	0,12	120	Погружение, замачивание
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы, аппараты	0,03	60	Протирание или орошение
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель и др., загрязнённые белковыми выделениями	0,06	60	Орошение
Посуда без пищевых остатков	0,03	120	Погружение
Посуда с пищевыми остатками	0,12	120	Погружение
Бельё, загрязнённое выделениями	0,21	120	Замачивание
Предметы ухода, игрушки	0,12	120	Погружение или орошение
Медицинские отходы	0,21	120	Замачивание
Сантехника*	0,06	120	Орошение
Жидкие выделения и фекалии	-	120	Засыпка или растворение*
Уборочный инвентарь	0,21	120	Замачивание

\* жидкие выделения и фекалии засыпать в соотношении 10:1 (объём/вес).

**Таблица 6. Режимы обработки при сибирской язве**

Объект обеззараживания	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Изделия мед. назначения	3,0	120	Погружение
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы и др.	1,2	60	Протирание, орошение
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы и др., загрязнённые белковыми выделениями	1,5	120	Орошение
Посуда без пищевых остатков	1,5	120	Погружение
Посуда с пищевыми остатками	3,0	120	Погружение
Бельё, загрязнённое выделениями	3,0	120	Замачивание
Предметы ухода за больными, игрушки	3,0	120	Погружение
Сантехника, резиновые коврики	3,0	120	Орошение
Медицинские отходы	3,0	120	Замачивание
Жидкие выделения и фекалии	3,0	120	Засыпка*
Уборочный материал	3,0	120	Замачивание

\* жидкие выделения и фекалии засыпать в соотношении 1:1 (объём/вес).

**Таблица 7. Режимы обработки при вирусных инфекциях (гепатите В, ВИЧ-инфекции, полиомиелите)**

Объекты обеззараживания	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель и др., транспорт*	0,015	60	Протирание, орошение
	0,03	30	
Сантехника*	0,03	120	Протирание/орошение 2 раза
	0,06	60	
Посуда без пищевых остатков	0,015	15	Погружение
Посуда с пищевыми остатками	0,12	120	Погружение
Посуда лабораторная	0,12	120	Погружение
Предметы для мойки посуды	0,21	120	Погружение
Бельё не загрязнённое выделениями	0,015	60	Замачивание
Бельё, загрязнённое выделениями	0,21	120	Замачивание
	0,3	60	
Уборочный инвентарь, материал*	0,21	120	Замачивание
	0,3	60	
Предметы ухода за больными	0,06	90	Протирание/погружение
	0,12	60	
Игрушки	0,06	15	Орошение/протирание// погружение
	0,12	90	
Изделия мед. назначения	0,06	90	Погружение
	0,12	60	
Мед.отходы, ИМН однократного применения перед утилизацией	0,21	120	Погружение, замачивание
	0,3	60	
Жидкие выделения, фекалии**	1:10	90	Засыпка порошком

\* допускается добавление моющего средства

\*\* засыпка в отношении 1 объём средства к 10 объёмов выделений (обеспечивается также уничтожение бактерий (включая туберкулёз) и грибов).

**Таблица 8. Режимы обработки при генеральных уборках в лечебно-профилактических учреждениях**

Профиль учреждения	Концентрация по АХ, %	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерско-гинекологические отделения, кабинеты и лаборатории	0,015	60	Протирание
	0,03	30	
Противотуберкулезные ЛПУ	0,06	60	Протирание
	0,12	30	
Инфекционные ЛПУ	-	-	-
Кожно-венерологические ЛПУ	0,06	60	Протирание
	0,12	30	

ООО «ПРО-БРАЙТ»  
196084, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, д.31/2  
Тел.: +7 (812) 244-44-20  
post@pro-brite.com  
www.pro-brite.com  
vk.com/probrite

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003763.05.12 от 16.05.2012  
Декларация о соответствии ГОСТ Р 51696-2000

